

tetesept:



Meerwasser Nasenspülsalz

UVP*: 4.99 EUR

Stand: 17.9.2024

Das Wichtigste in Kürze:

- 95% Kundenzufriedenheit¹
- Befreit & befeuchtet
- Reinigt tiefenwirksam
- Bei Schnupfen & Pollenallergie
- Auch für Kinder ab 3 Jahren

Eigenschaften:

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz

Die Nase wird täglich durch Umwelteinflüsse wie Staub und Schmutz, Allergene, Erkältungsviren und andere Krankheitserreger beansprucht. Für die Gesunderhaltung der Nasenschleimhaut ist eine schonende und intensive Tiefenreinigung und Befeuchtung der Nasenhöhle wichtig.

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz enthält naturreines BIOMARIS Meersalz, das sich durch einen Multimineralkomplex auszeichnet. Der Salzkomplex des tetesept Nasenspülsalz ist wichtig für:

- die abschwellende Wirkung der Spüllösung auf die Nasenschleimhaut – auch bei Allergien
- das effektivere Ausspülen von Erregern und Allergenen

Der Spülvorgang unterstützt auch die bessere Lösung von festsitzenden Sekreten und trägt so zum Abtransport dieser bei.

Damit eignet sich tetesept Meerwasser Nasenspülsalz als schonendes, natürliches

Mittel:

- bei Schnupfen inkl. Nasennebenhöhlenbeschwerden
- bei Heuschnupfen
- zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenhöhle
- zur Unterstützung bei der Vorbeugung von Infekten

Auch zur langfristigen Anwendung geeignet (bis zu 30 Tage).
tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist leicht löslich und praktisch
vorportioniert in Dosierbeuteln für eine 250 ml Lösung. Die Beutel lassen sich
einfach und ohne Hilfsmittel öffnen.

Anwendung & Hinweise:

Dosierung und Dauer der Anwendung: tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist für
die
Anwendung mit handelsüblichen Nasenduschen unter Verwendung von 250 ml
Wasser
(entspricht dem Füllvolumen der tetesept Meerwasser Nasendusche) geeignet.
Das
Wasser sollte eine Temperatur von 37 °C aufweisen.

1. Isotone Salzlösung = 1 Dosierbeutel in 250 ml Wasser Der Salzgehalt dieser
Lösung entspricht exakt der Konzentration des Blutes im menschlichen Körper
und
ist daher besonders sanft. Zur vorbeugenden und regelmäßigen Anwendung (bis
zu
30 Tage). Bis zu 3x täglich mit je 250 ml Lösung.

2. Hypertone Salzlösung = 2 Dosierbeutel in 250 ml Wasser Der erhöhte
Salzgehalt
dieser Lösung bewirkt ein natürliches Anschwellen der Nasenschleimhäute, da
diesen durch den Osmose- Effekt überschüssige Flüssigkeit entzogen wird. Zur
Anwendung bei akuten Beschwerden wie verstopfter Nase und Schnupfen. Bis zu
2x täglich mit je 250 ml Lösung.

Anwender sollten sich an ihren Arzt wenden, wenn nach 4–5 Tagen der
Anwendung
keine Besserung oder sogar eine Verschlimmerung der Symptome zu verzeichnen
ist.

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist für die Anwendung bei Kindern über 3 Jahren und allen Patientengruppen einschließlich schwangerer und stillender Frauen bestimmt. Kinder unter 12 Jahren sollten eine Nasendusche nur unter Aufsicht verwenden.

Frei von Konservierungsmitteln.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung:

1 Beutel enthält BIOMARIS Spezial Meersalz 0,45 g, Natriumchlorid 1,79 g, Magnesiumcarbonat.

Handelsform:

40 Dosierbeutel

GTIN:

4008491115612

PZN:

18061746