

tetesept:



Meerwasser Nasendusche

UVP*: 12.99 EUR

Stand: 17.9.2024

Das Wichtigste in Kürze:

- 96% Weiterempfehlung¹
- Reinigt und befeuchtet wirksam
- Spült Erreger + Allergene aus
- 2 austauschbare Aufsatzköpfe
- Auch für Kinder ab 3 Jahren

Eigenschaften:

Die Nase wird täglich durch Umwelteinflüsse wie Staub und Schmutz, Allergene, Erkältungsviren und andere Krankheitserreger beansprucht. Für die Gesunderhaltung der Nasenschleimhaut ist eine schonende und intensive Tiefenreinigung und Befeuchtung der Nasenhöhle wichtig.

Die regelmäßige Anwendung der tetesept Meerwasser Nasendusche mit tetesept Meerwasser Nasenspülsalz unterstützt die Funktion der Nase auf natürliche Weise.

Hierzu zählt auch die effektive Abwehr von Erkältungsverursachern und Allergieauslösern. Nasenspülungen eignen sich zur schonenden Schnupfentherapie und sorgen für befreites Durchatmen.

tetesept Meerwasser Nasendusche ist ein Familienset mit austauschbaren Aufsatzköpfen in zwei verschiedenen Größen und Spülstärken. Die Aufsatzköpfe bieten die individuelle Auswahl zwischen einem sanften und einem intensiven Spülstrahl.

Durch die unterschiedlichen Formen der Aufsatzköpfe passt die Nasendusche optimal für kleine und größere Nasen. Die Nasendusche ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet. Sie eignet sich auch für Schwangere und Stillende.

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz enthält naturreines BIOMARIS Meersalz, das sich durch einen Multimineralkomplex auszeichnet. Der Salzkomplex des tetesept Nasenspülsalz ist wichtig für:

- die abschwellende Wirkung der Spüllösung auf die Nasenschleimhaut – auch bei Allergien
- das effektivere Ausspülen von Erregern und Allergenen

Der Spülvorgang unterstützt auch die bessere Lösung von festsitzenden Sekreten und trägt so zum Abtransport dieser bei. tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist leicht löslich und praktisch vorportioniert in Dosierbeuteln für eine 250 ml Lösung. Die Beutel lassen sich einfach und ohne Hilfsmittel öffnen.

Anwendung & Hinweise:

1. Vor dem ersten Gebrauch alle Kunststoffteile gründlich reinigen.
2. Flasche mit 250 ml handwarmem Wasser bis zur Markierung befüllen.
3. 1–2 Beutel tetesept Meerwasser Nasenspülsalz einfüllen und auflösen (Flasche leicht schwenken).
4. Schraubaufsatz dicht verschließen, passenden Aufsatzkopf auf den Nasenbügel aufsetzen.
5. Nasendusche nun drehen, sodass Ventilknopf nach oben zeigt.
6. Nasenaufsatz vorsichtig an ein Nasenloch anlegen. Während der Anwendung durch den Mund atmen und den Kopf leicht zum anderen Nasenloch neigen.
7. Durch Betätigen des Druckknopfs an der Flasche gelangt Spülflüssigkeit in die Nase und am 2. Nasenloch wieder heraus.

Dosierung und Dauer der Anwendung:

1: Isotone Salzlösung: (1 Dosierbeutel in 250ml Wasser)

Zur vorbeugenden und regelmäßigen Anwendung bis zu 3-mal täglich mit 250 ml Lösung.

2: Hypertone Salzlösung: (2 Dosierbeutel in 250ml Wasser)

Zur Anwendung bei akuten Beschwerden wie verstopfter Nase und Schnupfen bis zu 2-mal täglich mit 250 ml Lösung.

Die Dauer der Anwendung sollte 30 Tage nicht überschreiten.

tetesept Meerwasser Nasendusche ist an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten und lichtgeschützten Ort zu lagern.

Von ätzenden Flüssigkeiten und Gasen fernhalten. tetesept Meerwasser Nasenspülsalz trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- Erkältungskrankheiten und unterstützende Vorbeugung von Infekten
- Nasennebenhöhlenbeschwerden, -entzündung
- Pollen- und Hausstauballergie
- Trockene Nase
- Bei Staub- und Schmutzbelastung
- Reinigung und Befeuchtung der Nasenhöhle

Gebrauchsanweisung beachten

Verwendbar bis: siehe Bodenlasche

Zusammensetzung:

Dies ist eine Behandlungseinheit bestehend aus den Medizinprodukten tetesept Meerwasser Nasendusche und tetesept Meerwasser Nasenspülsalz.

Inhalt der Behandlungseinheit:

1 Nasendusche mit 2 Aufsätzen,

4 Dosierbeutel tetesept Meerwasser Nasenspülsalz

Zusammensetzung tetesept Meerwasser Nasenspülsalz:

1 Dosierbeutel enthält BIOMARIS Spezial Meersalz 0,45 g, Natriumchlorid 1,79g, Magnesiumcarbonat. Frei von Konservierungsmitteln.

Handelsform:

1 Dusche, 2 Aufsatzköpfe, 4 Beutel Nasenspülsalz

GTIN:

4008491115698

PZN:

17365065