



Dornwarzenpflaster intensiv

UVP*: 6.99 EUR

Stand: 17.9.2024

Das Wichtigste in Kürze:

- 24h Wirkung Tag und Nacht
- Punktgenaue Wirkung mit Salicyl- & Milchsäure
- Lindert den Druckschmerz
- Schützt vor Infektionsausbreitung
- Wirksame Entfernung von Dornwarzen

Eigenschaften:

tetesept Dornwarzen-Pflaster intensiv für eine punktgenaue Entfernung von schmerzenden Dornwarzen. Durch die hautschälende Wirkung von Salicyl- und Milchsäure wird die Warze von außen nach innen aufgelöst. Der Wirkstoffpunkt bietet so eine effektive und gezielte Heilung, ohne umliegende, gesunde Haut zu verletzen. Das Druckschutzpflaster schafft Druckentlastung und lindert so den Schmerz beim Gehen.

Anwendung & Hinweise:

Die Behandlung erfolgt in 2 Schritten (empfohlene Anwendungsdauer 7- 14 Tage).Tagsüber: Tag-Wirkstoffpunkt & Druckschutzpflaster
Schritt 1: Morgens entfernen Sie einen Tag-Wirkstoffpunkt vom Trägerpapier und kleben diesen direkt auf die Dornwarze. Wir empfehlen nach dem Duschen oder einem warmen Fußbad.
Schritt 2: Entfernen Sie ein Druckschutzpflaster vom Trägerpapier und fixieren damit den Wirkstoffpunkt auf der betroffenen Stelle. Fest andrücken, damit das Pflaster sicher haftet.
Nachts: Nacht-Wirkstoffpunkt
Entfernen Sie vor dem Schlafengehen das Druckschutzpflaster und den Tag-Wirkstoffpunkt. Kleben Sie

einen atmungsaktiven Nacht-Wirkstoffpunkt auf die Warze.

Gebrauchsanweisung beachten. Nur zur Anwendung auf Dornwarzen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf geröteter oder verletzter Haut anwenden. Bei Hautirritationen Anwendung sofort abbrechen. Diabetiker, Menschen mit Blutzirkulationsstörungen, schwangere oder stillende Frauen und Kinder unter 16 Jahren sollten vor der Anwendung einen Arzt zu Rate ziehen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Enthält 35 % Salicylsäure und 2,1 % Milchsäure. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 7- 14 Tage. Falls die Warze nicht vollständig entfernt wurde, kann der Behandlungszyklus wiederholt werden. Die maximale Anwendungsdauer sollte 12 Wochen nicht überschreiten. In der Originalverpackung an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

Zusammensetzung:

35 % Salicylsäure, 2,1 % Milchsäure

Handelsform:

24 Wirkstoffpunkte +12 Druckschutzpflaster

GTIN:

4008491751520

PZN:

16806188