



Meerwasser Nasenspülsalz

UVP*: 4.99 EUR

Stand: 8.1.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- 95% Kundenzufriedenheit¹
- Befreit & befeuchtet
- Reinigt tiefenwirksam
- Bei Schnupfen & Pollenallergie
- Auch für Kinder ab 3 Jahren

Eigenschaften:

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz unterstützt bei regelmäßiger Anwendung die Funktion der Nase auf natürliche Weise. Hierzu zählt auch die effektive Abwehr von Erkältungsverursachern und Allergieauslösern. Nasenspülungen eignen sich zur schonenden Schnupfentherapie und sorgen für befreites Durchatmen.

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz Die Nase wird täglich durch Umwelteinflüsse wie Staub und Schmutz, Allergene, Erkältungsviren und andere Krankheitserreger beansprucht. Für die Gesunderhaltung der Nasenschleimhaut ist eine schonende und intensive Tiefenreinigung und Befeuchtung der Nasenhöhle wichtig.

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz enthält naturreines BIOMARIS Meersalz, das sich durch einen Multimineralkomplex auszeichnet. Der Salzkomplex des tetesept Nasenspülsalzes ist wichtig für:

- die abschwellende Wirkung der Spüllösung auf die Nasenschleimhaut
 - auch bei Allergien
- das effektivere Ausspülen von Erregern und Allergenen

Der Spülvorgang unterstützt auch die bessere Lösung von festsitzenden Sekreten

und trägt so zum Abtransport dieser bei. Damit eignet sich tetesept Meerwasser Nasenspülsalz als schonendes, natürliches Mittel:

- bei Schnupfen inkl. Nasennebenhöhlenbeschwerden
- bei Heuschnupfen
- zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenhöhle
- zur Unterstützung bei der Vorbeugung von Infekten

Auch zur langfristigen Anwendung geeignet (bis zu 30 Tage).

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist leicht löslich und praktisch vorportioniert in Dosierbeuteln für eine 250 ml Lösung. Die Beutel lassen sich einfach und ohne Hilfsmittel öffnen.

Anwendung & Hinweise:

Dosierung und Dauer der Anwendung: tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist für die Anwendung mit handelsüblichen Nasenduschen unter Verwendung von 250 ml Wasser (entspricht dem Füllvolumen der tetesept Meerwasser Nasendusche) geeignet. Das Wasser sollte eine Temperatur von 37 °C aufweisen.

1. Isotone Salzlösung = 1 Dosierbeutel in 250 ml Wasser Der Salzgehalt dieser Lösung entspricht exakt der Konzentration des Blutes im menschlichen Körper und ist daher besonders sanft. Zur vorbeugenden und regelmäßigen Anwendung (bis zu 30 Tage).

Bis zu 3x täglich mit je 250 ml Lösung.

2. Hypertone Salzlösung = 2 Dosierbeutel in 250 ml Wasser Der erhöhte Salzgehalt dieser Lösung bewirkt ein natürliches Abschwellen der Nasenschleimhäute, da diesen durch den Osmose- Effekt überschüssige Flüssigkeit entzogen wird. Zur Anwendung bei akuten Beschwerden wie verstopfter Nase und Schnupfen.

Bis zu 2x täglich mit je 250 ml Lösung.

Anwender sollten sich an ihren Arzt wenden, wenn nach 4–5 Tagen der Anwendung keine Besserung oder sogar eine Verschlimmerung der Symptome zu verzeichnen ist.

Zweckbestimmung: tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist für die Herstellung

einer isotonen Nasenspüllösung zur Befeuchtung, Reinigung und zur Unterstützung der Funktion der Nasenschleimhaut oder für die Herstellung einer hypertonen Nasenspüllösung zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bestimmt.

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist für die Anwendung bei Kindern über 3 Jahren und allen Patientengruppen einschließlich schwangerer und stillender Frauen bestimmt. Kinder unter 12 Jahren sollten eine Nasendusche nur unter Aufsicht verwenden.

Frei von Konservierungsmitteln. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung:

1 Beutel enthält BIOMARIS Spezial Meersalz 0,45 g, Natriumchlorid 1,79 g, Magnesiumcarbonat.

Handelsform:

40 Dosierbeutel

GTIN:

4008491115612

PZN:

18061746