



Narben Pflaster

UVP*: 5.99 EUR

Stand: 4.8.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- Flexibel, wasserdicht
- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Passgenau zuschneidbar
- Transparent, Repositionierbar, Klinisch getestet

Eigenschaften:

tetesept Narben Pflaster wurde professionell entwickelt, um sowohl bei alten als auch bei neuen Narben optimal zu wirken und die Sichtbarkeit intensiver Narben zu reduzieren und die Hautfeuchtigkeit zu steigern. Es ist sicher und effektiv und kann bei hypertrophen Narben oder erhöhten und farbigen Keloidnarben angewendet werden.

Die Silikonrolle ist so konzipiert, dass sie eine semiokklusive Barriere bildet, die die Hydratisierung des Narbengewebes verbessert. Darüber hinaus steigert sie die Temperatur des Narbengewebes. Dies hilft dabei, den körpereigenen Regenerationsprozess der Haut zu aktivieren, und unterstützt die Verbesserung des Aussehens der Narbe. Die Narbe wird flacher, leichter und weicher.

tetesept Narben Pflaster ist für alle Arten von Narben geeignet:

Operations-, Kaiserschnitt-, Verbrennungs-, Akne-, Hypertrophe Narben

Reduziert Sichtbarkeit von Narben

Verringert Berührungsempfindlichkeit

Macht Narben weicher, flacher, blasser

Anwendung & Hinweise:

Wunde und umgebenden Bereich reinigen und trocknen. Pflaster anbringen und einige Minuten warten, bis es perfekt sitzt. Die Behandlung kann begonnen werden, sobald die Wunde vollständig geschlossen und verheilt ist und im Falle eines chirurgischen Eingriffs die Fäden entfernt wurden.

Klinische Studien haben positive Ergebnisse nach 8 Wochen durchgängiger Anwendung von mindestens 12 Stunden pro Tag gezeigt. Erste Ergebnisse stellen sich nach 3 bis 4 Wochen ein. Eine Anwendung des Pflasters von mehr als 8 Wochen kann zur weiteren Verbesserung des Erscheinungsbilds der Narbe beitragen. Ergebnisse können je nach Person und Narbe unterschiedlich ausfallen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken umgehend an einen Arzt wenden und die Produktverpackung vorlegen.

Sollten nach der Anwendung starke Hautrötungen oder ein anhaltendes Brennen auftreten, Pflaster sofort entfernen und betroffene Stelle gründlich mit viel Wasser abspülen. Umgehend an einen Arzt wenden, wenn die Symptome bestehen bleiben. Nicht auf gereizter Haut oder Wunden anwenden.

Kühl und trocken lagern. Nur für die externe Anwendung. Bei schwerwiegenden Zwischenfällen Hersteller und zuständige Behörde benachrichtigen.

Zusammensetzung:

Silikonpflaster

Handelsform:

100 cm Silikonpflaster

GTIN:

4008491129800

PZN: